



GERÄTE/ZUBEHÖR

# Lydos F-Wandspender für 500 ml Flaschen

Spender für flüssige Handwaschmittel und  
alkoholische Händedesinfektionsmittel



CE


# Montage- und Bedienungsanleitung

## Allgemeine Hinweise:

Es wird empfohlen, den Spender nur mit solchen Produkten zu betreiben, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.


Eine gelegentliche Reinigung mit warmem Wasser und Desinfektion mit alkoholischen Desinfektionsmitteln wird empfohlen.

Produktreste trocknen und verkleben nicht, wenn immer auf einen gefüllten Präparatebehälter geachtet wird. Bei eventuellen Verklebungen bitte nur mit heißem Wasser und Bürste reinigen. Keinesfalls Ventil abdrehen oder Pumpe öffnen.

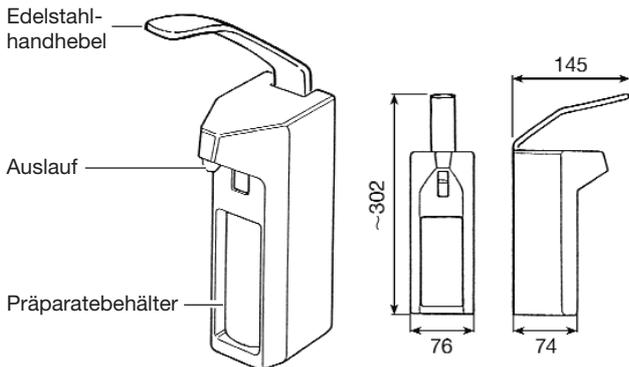


Maße in mm (techn. Änderungen vorbehalten)

1

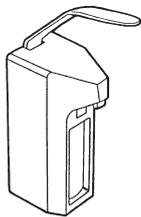


Spender für flüssige Handwaschmittel und alkoholische Händedesinfektionsmittel.

2

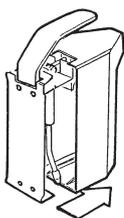


Das Gehäuse ist aufgeklipst. Gehäuse nach vorne abziehen.

3

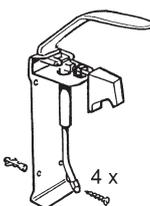


Befestigung: in geeigneter Höhe mit den beiliegenden vier Schrauben und Dübeln befestigen.

4

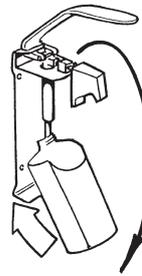


Flasche einsetzen und Spender einige Male pumpen.

5

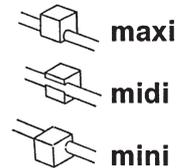


Falls erforderlich: Dosierbegrenzung einstellen. Dazu Kunststoff-Dosierstück in gewünschte Position drehen.

6

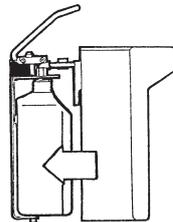

Gehäuse aufclippen.

7

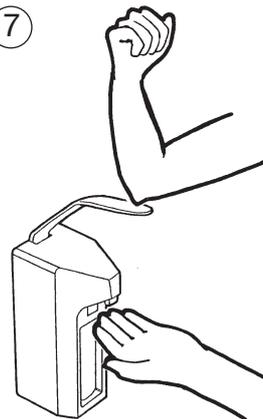

Hygienische Ellenbogen- oder Unterarmbedienung.

## VERSANDEINHEIT/PACKUNG

Lydos F-Wandspender

Art.-Nr. 5810

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an. Wir rufen sofort zurück.

D: 030 - 77 99 2-0



**Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**  
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin  
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM  
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



**LYSOFORM**  
**Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG**  
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch  
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14