

DESIFOR-B

Flüssiger Flächendesinfektions- reiniger

VAH-gelistet (ehem. DGHM)



EINSATZBEREICH

Universell einsetzbar zur Reinigung und Desinfektion in medizinischen Einrichtungen auf wasserfesten Oberflächen und Böden.

ANWENDUNG

Flächendesinfektion zur Prophylaxe in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Praxen

Anwendung	Konzentration	Einwirkzeit
Scheuerwischdesinfektion bei geringer organischer Belastung	2,0 %	15 Min.
	1,5 %	60 Min.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang
- Bakterizid und fungizid (Standardmethoden der VAH (ehem. DGHM))
- Gute Materialverträglichkeit
- Frei von Aldehyden, Alkalien, Säuren und Chlor

HINWEIS

Produkt nur mit kaltem Wasser anwenden! Gemäß UVV sind beim Umgang mit desinfizierenden Reinigern auch in der Anwendungslösung Schutzhandschuhe zu tragen.

INHALTSSTOFFE

Nichtionische und kationische Tenside, Komplexbildner, Alkohol, Hilfsstoffe.

Desinfektionswirkstoff: quaternäre Ammoniumverbindungen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Kanister à 10 Liter	Art.-Nr. 20517
Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter	Art.-Nr. 20514
Produktcode	GD 30
Kennz. n. GefStoffV:	Xi, reizend N, umweltgefährlich

DESIFOR-B sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 07/06