



FLÄCHEN-
DESINFEKTIONSMITTEL

Aerodesin®

Gebrauchsfertige Desinfektion auf Alkoholbasis zur
Schnell-Desinfektion von Medizinprodukten

Désinfectant prêt pour l'emploi à base d'alcool pour
une désinfection rapide des dispositifs médicaux



CE 0482

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen

Aerodesin®

Gebrauchsfertig

Zur gewerblichen Verwendung

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten:
32,5 g Propan-1-ol, 18,0 g Ethanol (vergällt)

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Schnell-Desinfektion von

- kleinen Flächen und Gegenständen

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Unverdünnt anwenden!

Aerodesin® aufbringen und mit trockenem Tuch verreiben.
Die Flächen und Gegenstände sind vollständig zu benetzen
(max. 50 ml/m²).

Flächen-Desinfektion

Hospitalismus-Prophylaxe konz. - 1 min
begrenzt viruzid* inkl. HBV/HCV/HIV konz. - 30 s

*gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 01/2004.

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Aerodesin® ist entzündlich (Flammpunkt nach DIN 51755: 28 °C)!
- Nicht in offene Flamme oder auf glühende Gegenstände spritzen! Ausbringung max. 50 ml/m² Raumgrundfläche.
- Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken, nicht in der Nähe von Zündquellen und für Kinder unzugänglich lagern.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133,
12247 Berlin, Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99-269

EIGENSCHAFTEN

- bekämpft Bakterien (inkl. Tbc), Pilze und behüllte Viren
- schneller Wirkungseintritt und rasche Abtrocknung nach Desinfektion der Flächen und Gegenstände
- frischer Geruch
- gute Netzfähigkeit

BESONDERE HINWEISE

- Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch
Aerodesin® ist reizend bei Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen, Darm etc.). Als Sofortmaßnahmen bei solchen Reizungen wird die Verdünnung des Präparates empfohlen. Bei oraler Einnahme reichlich Wasser trinken, bei Kontakt mit sonstigen Schleimhäuten reichlich mit Wasser spülen. In jedem Fall ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- Sonstiges
Kein Kontakt mit alkoholempfindlichen Materialien (Lackierungen, Beizungen, Acrylglass u. a.).
- Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

12 x 1-Liter-Flasche

Art.-Nr. 9896

Mode d'emploi

à lire attentivement!

Aerodesin®

Prêt à l'emploi

Pour usage professionnel

COMPOSITION:

100 g de solution contiennent:
32,5 g propan-1-ol, 18,0 g d'éthanol (dénaturé)

DOMAINE D'UTILISATION:

Disinfection rapide pour:

- Petites surfaces et objets

MODE D'UTILISATION

Utilisation non diluée seulement!

Appliquer sur les surfaces avec un chiffon sec. Les surfaces et objets doivent être complètement humidifiés par le produit (50 ml/m² au max.)

Désinfection des surfaces:

A l'hôpital et au cabinet médical concentré - 1 mn
Virucide vis-à-vis des virus enveloppés*
HBV/HCV/HIV inclus concentré - 30 sec

*conf. aux recommandations du RKI de 01/2004.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Produit inflammable! Point éclair d'après DIN 51755: 28 °C.
- Ne pas faire d'éclaboussures en direction d'une flamme ou sur des objets incandescents. Utilisation max: 50 ml/m² aire de la pièce.
- Ceci est un désinfectant! Conserver au sec et au frais, mais à l'abri du gel, dans un endroit bien ventilé loin de produits inflammables et hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

PROPRIÉTÉS

- Lutte contre les bactéries (BK inclus), les champignons et les virus enveloppes
- Efficacité et séchage rapides après la désinfection des surfaces et des objets
- Odeur fraîche
- Bon effet mouillant

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Contre-mesures en cas d'utilisation incorrecte: Au cas où Aerodesin® viendrait en contact avec les muqueuses (yeux, gorge, estomac, intestins etc.), consulter un médecin immédiatement. Diluer le produit sans attendre en faisant boire une quantité d'eau importante au patient. En cas de projections dans les yeux, rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin dans tous les cas.
- Ne pas utiliser sur des surfaces craignant l'alcool (laques, vernis, Plexiglas)
- Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Lisez l'étiquette et le mode d'emploi avant l'utilisation.

Ce produit est certifié conforme et figure sur les listes appropriées.

CONDITIONNEMENT

12 x 1000 ml

Art.-Nr. 9896

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerons aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14