




# APESIN SPRAY

## Alkoholisches Flächendesinfektions-Pumpspray bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend

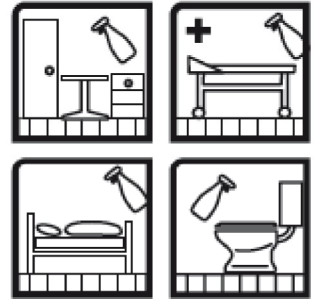

### Zusammensetzung:

100 g APESIN SPRAY enthalten: 70g Propan-2-ol, 0,1g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan- 1,3-diamin, Duftstoffe.  
pH-Wert ca. 10

### Leistung:

APESIN SPRAY ist ein schnellwirkendes Flächendesinfektionsmittel. Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend. Farblos, angenehm im Geruch, sehr gut hautverträglich. APESIN SPRAY bietet sich auch zur Desinfektion von OP-Schuhen an. Chlor-, aldehyd-, phenolfrei. Gezielt anwendbar. Gute Materialverträglichkeit. Umfassend geprüft und begutachtet nach:

Dosierung/Einwirkzeit	30 sek.	1 min.	5 min.	15 min.
DGHM-VAH, geringe org. Belastung mit Mechanik			konz.	
DGHM-VAH, hohe org. Belastung mit Mechanik			konz.	
Schnelldesinfektion*		konz.		
TBC DGHM-VAH geringe/hohe org. Belastung mit Mechanik			konz.	
TBC ** Schnelldesinfektion		konz.		
Begrenzt viruzid: DVV/RKI: HBV, HIV, HCV sowie animalische, humane Influenza A/Viren, z.B. H1N1, H3N8	konz.			konz.
Rotavirus	konz.			
Norovirus				konz.
* Schnelldesinfektion nach Methode DGHM-VAH geringe/hohe org. Belastung				
** TBC-Schnelldesinfektion nach Methode DGHM-VAH geringe/hohe org. Belastung				
begrenzt viruzid: Wirksam gegen alle behüllten Viren				
Geprüft nach den europäischen Normen EN 1040, 1275, 1276, 1650, 13697.				

### Anwendungsbereich:

Zur Desinfektion von Geräten, Mobiliar und Flächen in Klinik und Arztpraxis. Mit APESIN SPRAY können z.B. Matratzen, Bettgestelle, Transportwagen, Instrumentenablage, Badematten und -roste, Abfalleimer, Toilettensitze, Armaturen, Türgriffe, Möbel- und Arbeits-flächen, Geländer, Schuhe, Strümpfe etc. sowie alle schwer zugänglichen Stellen desinfiziert werden. Nicht auf alkoholempfindlichen Materialien (z.B. Plexiglas) anwenden.

### Anwendung:

Unverdünnt anwenden. Aus einer Entfernung von 20-30 cm Gegenstände direkt so ansprühen, dass eine vollständige Benetzung der Flächen erzielt wird, oder auf ein sauberes Wischtuch sprühen und wischen.

### Aufbringung:

Max. 50 ml / m<sup>2</sup>. Keine größeren Flächen einsprühen (max. 2 m<sup>2</sup>). Ausrüstung gut mit Wasser reinigen.

### Besondere Hinweise:

Leichtentzündlich. Reizend. Reizt die Augen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich das Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Produkt nur bei Raumtemperatur und im Originalgebinde lagern.

N-14166 N-14167 MZ Nr. 1990/04

### Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschromstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Produkt-Code: GD 0

Best. Nr.: 0407216

10 x 750ml

