



# DESCO WIPES DT

*Vliestücher zur Tränkung  
mit Flächendesinfektionsmitteln*

- zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln
- wiederbefüllbares Spendersystem
- optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche

Die hygienisch  
einwandfreie Lösung!



CE

## PRÄPARATETYP

Trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten. Die Tücher sind aus qualitativ hochwertigem, fusselfreiem Vliesstoff. Auf Grund der quervernetzten Vliesstruktur sind **DESCO WIPES DT** sehr strapazierfähig und besonders reißfest. Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden.

**DESCO WIPES DT** wurden **speziell für die Flächendesinfektion** entwickelt. Sie geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Fläche.

**DESCO WIPES DT** können aus einem eigens dafür konzipierten **DESCO WIPES VLIESTUCHSPENDER** entnommen werden. Die Entnahme erfolgt aus einem sehr praktikablen, wiederverschließbaren Spendersystem.

Die Anwendungslösung wird somit durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt.

## DESCO WIPES VLIESTUCHSPENDER

Ein speziell für die Herstellung, hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Tücher konzipierter Spender aus Polyethylen und Polypropylen. Die Entnahme erfolgt aus einem speziell für diese Anwendung konzipierten, absolut dichten, wiederverschließbaren Tuchspendersystem. Spülmaschinenfest bis 60° C.

Ein spezielles Etikett, welches die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum erleichtert, ist jedem Vliestuchspender beigelegt.

## ANWENDUNG

2,5 - 3 Liter (bei Verwendung der 50-Blatt Rolle 1 - 1,5 Liter) gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Desinfektionsmittels herstellen (Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeit den Herstellerangaben entnehmen).

Anschließend erfolgt die Tränkung der Tücher im Spendereimer mit 2,5 - 3 Litern (bei Verwendung der 50-Blatt Rolle mit 1 - 1,5 Litern) der Gebrauchslösung des Desinfektionsmittelkonzentrats oder des gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittels. Es dauert 30-60 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind.

Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen.

Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!

Die **Standzeit** wurde für unsere Flächendesinfektionsmittelkonzentrate in den von der VAH/ÖGHMP empfohlenen Konzentrationen untersucht.

Zu dem wurde die Standzeit unserer gebrauchsfertigen alkoholischen Schnelldesinfektionsmittel untersucht.

Die Standzeiten betragen jeweils mindestens 28 Tage.

Neben den Flächendesinfektionsmitteln von Dr. Schumacher können **DESCO WIPES DT** auch mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Bitte auch Herstellerangaben zur Stabilität der Flächendesinfektionsmittel beachten.

**DESCO WIPES DT** sind einzeln abreißbar und sollten einzeln aus der Applikationsöffnung entnommen werden. Nachfolgende Tücher sind durch die große Auffangschale mit Deckel des Spendersystems sicher geschützt.

Spezielle Etiketten, die die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum des entsprechenden Desinfektionsmittels erleichtern, sind jeder Vliesrolle beigelegt.

Vlietuchspender nicht unmittelbaren Wärmequellen aussetzen.

Weitere ausführliche Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte unserem separat erhältlichen **DESCO WIPES** Flyer.

## ANWENDUNG:

**BEFÜLLEN DES  
DESCO WIPES  
VLIESTUCHSPENDERS**



**DR. SCHUMACHER GMBH**  
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld  
Telefon +49 5664 9496-0

[WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM](http://WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM)

# DESCO WIPES DT

Vliestücher zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln

## ANWENDUNGSBEREICHE

**DESCO WIPES DT** können zur Flächendesinfektion und Reinigung in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen, der pharmazeutischen Industrie, in Labors sowie in der Lebensmittelindustrie und Küchen angewendet werden.

Sie sind besonders geeignet für:

- patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Patientenliegen, insbesondere in Isolierzimmern z.B. bei MRSA-Patienten.
- alle Arbeitsflächen
- Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluß zur Verfügung steht oder eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist
- schwer zugängliche Flächen

## ZUSAMMENSETZUNG


1 Rolle besteht aus 100 bzw. 50 Wischtüchern à 32 cm x 30 cm, trocken, aus hochwertigem, fusselfreiem Spunlace-Lochvlies. 100% Kunstfaser-Mischung.

## LIEFERFORMEN

| Einzelpackung                                                                     | Verkaufseinheit | PZN | Art.-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------|
| 1 Packung<br>Desco Wipes DT<br>Rolle à 100 Blatt                                  | 6 x 1 Rolle     | -   | 00-915-RD10006 |
| 1 Packung<br>Desco Wipes DT<br>Rolle à 100 Blatt                                  | 3 x 1 Rolle     | -   | 00-915-RD10003 |
| 1 Packung<br>Desco Wipes DT<br>Rolle à 50 Blatt                                   | 3 x 1 Rolle     | -   | 00-915-RD5003  |
| Desco Wipes<br>Vliestuchspender<br>1 Spendereimer,<br>unbefüllt                   | 1 x 1 Eimer     | -   | 00-915-E001    |
| Desco Wipes<br>Vliestuchspender<br>Vorratspackung<br>6 Spendereimer,<br>unbefüllt | 6 x 1 Eimer     | -   | 00-915-E002    |

## APPLIKATIONSHILFEN

| Einzelpackung             | Verkaufseinheit | PZN | Art.-Nr.   |
|---------------------------|-----------------|-----|------------|
| Desco Wipes<br>Wandhalter | 1 x 1 Halter    | -   | 00-902-EIM |

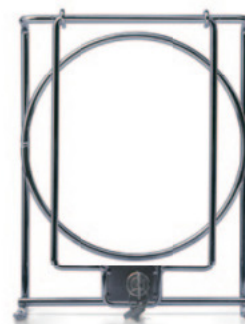

## GUTACHTEN

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **CLEANISEPT**, **BIGUANID FLÄCHE N**, **DESCOCEPT AF**, **DESCOCEPT PUR**, **OPTISAL N**, Terralin Protect und Incidin Plus im **DESCO WIPES SYSTEM**.

Desinfizierende Wirkung von **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESCOCEPT PUR**, **CLEANISEPT**, **DESCOCEPT AF** und **BIGUANID FLÄCHE N**.

Desinfizierende Wirkung von **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESOMED RAPID AF**. Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESOMED RAPID AF** und **BIGUANID PERFECT N** im **DESCO WIPES SYSTEM**.

Dr. Wecker, Dr. Schumacher GmbH, Melsungen:

Eignung des Vliestuchmaterials von **DESCO WIPES DT** zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln.

**B.Braun Melsungen AG:**

Stellungnahme zur Kompatibilität von B.Braun-Flächendesinfektionsmitteln in Verbindung mit **DESCO WIPES**.

## PRODUKTSTATUS/LISTUNGEN

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

## VERSCHIEDENE VERSCHLUSSDECKEL:

Sofern Sie für verschiedene Abteilungen oder Produkte unterschiedliche Vliestuchspender verwenden möchten, stehen hierfür Verschlussdeckel in farblichen Varianten zur Verfügung.



**DR. SCHUMACHER GMBH**  
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld  
Telefon +49 5664 9496-0

[WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM](http://WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM)