

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen.

Wartung

Der Duschhocker Redondo ist wartungsfrei. Sollte der Sitz defekte aufweisen wenden Sie sich an den Fachhändler oder Ihren Service zum Austausch des Sitzes.

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Technische Daten

Maximale Zuladung:	120 kg
Leergewicht:	2,8 kg (3,4 kg mit Soft-Pad)
Sitzfläche:	Ø 320 mm
Sitzhöhe:	470 640 mm
Option:	drehbare Sitzfläche, 360° (4x90° arretierbar)

Stand: 08/2006/Rev.1

Gebrauchsanweisung

Runder Duschhocker Redondo



Allgemeines

Für den hier beschriebenen Duschhocker Redondo ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs.

Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt.

Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Duschhocker Redondo wurde ausschließlich als Sitzmöglichkeit beim Duschen für Personen mit eingeschränkter Stehfähigkeit konzipiert. Der zusätzlich montierbare Softsitz bzw. drehbare Softsitz bietet einen deutlich höheren Komfort beim Sitzen, wie auch Hineindreuen in die Dusche.

Sicherheitshinweise / Benutzung

- Der Duschhocker muss sicher auf allen vier Füßen stehen. Ausrutschgefahr besteht beim Hinsetzen und Aufstehen in feuchten Badewannen oder Duschräumen, insbesondere dann, wenn Badezusätze oder Waschmittel verwendet wurden.
- Nach jedem Zerlegen und Wiederausammenbau des Duschhockers kontrollieren Sie die Stabilität und überprüfen Sie, dass alle Stuhlbeine in der gleichen Länge eingestellt sind.
- Lehnen Sie sich nicht übermäßig stark nach vorne oder hinten. Kippgefahr!
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass der Duschhocker fest und sicher in der Dusche steht und die Fußkapseln eben aufliegen.
- Bitte benutzen Sie, falls erforderlich zum Hinsetzen und Aufstehen, sowie Waschen und Duschen eine Hilfsperson, sofern Sie sich selbst nicht ausreichend halten können.

Lieferumfang

Der Redondo wird zerlegt in einem Karton geliefert.

1 x Sitzfläche

4 x Stuhlbeine (teleskopierbar)

1 x Soft-Pad (optional)

1 x Soft-Pad mit Drehscheibe (optional)

1 x Halteschraube für Soft-Pad mit Drehscheibe (optional)

Montage

- Legen Sie die Sitzfläche umgedreht auf eine ebene Fläche
- Schieben Sie die weißen Teile der Stuhlbeine in die dafür vorgesehenen Öffnungen (so, dass die Bohrungen alle Beine zur Innenseite des Hockers zeigen) und rasten Sie den Federstift ein.
- Schieben Sie nun die 4 Stuhlbeine ein und achten Sie darauf, dass alle Stuhlbeine in der gleichen Sitzhöhe eingestellt sind.



Option Soft-Pad

- Drücken Sie das Soft-Pad mit den dafür vorgesehenen Ausstülpungen in die Löcher auf der Sitzfläche.
- Achten Sie darauf, dass das Soft-Pad vollständig und eben auf der Sitzfläche aufliegt.



Option Soft-Pad mit Drehscheiben

- Platzieren Sie das Soft-Pad mit Drehscheibe mittig auf die Sitzfläche und schrauben Sie sie von unten mit der mitgelieferten Halteschraube fest.
- Um die Sitzfläche zu drehen ziehen Sie die Sperre nach oben.
- Drehen Sie die Sitzfläche nun in die gewünschte Richtung und lassen die Sperre wieder los.
- In 90° zur Ausgangsposition arretiert der Sitzfläche selbsttätig ein.

