

Wie ziehe ich einen TPE Handschuh korrekt an?



Ein TPE Handschuh hat im Vergleich zu anderen Elastomer Handschuhen aus Nitril oder Latex eine komplett andere chemische Struktur und dadurch eine andere Flexibilität. Dies spielt beim Anziehen des TPE Handschuhs eine große Rolle. In Prozessen, in denen Nachhaltigkeit und ein ständiger Handschuhwechsel wichtig und notwendig sind, ist es schwer einen Kompromiss zu finden. Das gelingt mit einer Reduzierung der Schichtstärke. Weniger Abfall, geringere Kosten. Das Handling beim Anziehen von TPE Handschuhen ist anders als bei herkömmlichen Einmalhandschuhen. Ein zu heftiger Zug auf das Material sollte vermieden werden, damit das Material nicht überdehnt und gegebenenfalls rissig wird oder reißt. Der TPE Handschuh ist in vielen Anwendungsbereichen (Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Kunststoffindustrie, Produktschutz, Pflege etc.) eine sehr gute Alternative zu denen aus Nitril, Latex oder Vinyl und bietet diverse Vorteile. Materialeinsparung/Umweltschutz, Lagerflächenreduktion durch den Boxeninhalte von 200 Stück statt 100 Stück, samtige Oberfläche, an der Lebensmittel nicht haften bleiben, frei von allergieauslösenden Proteinen, beständig gegen Fette und Öle, lebensmittelzertifiziert (für kurzzeitigen Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln), gut in der Pflege einsetzbar. Gerade in Zeiten der Knappheit vieler Materialien, wie beispielsweise Synthese- und Naturkautschuk, haben wir mit dem TPE Handschuh die Möglichkeit, auf eine sichere Alternative umzusteigen, damit die Nitril- und Latexhandschuhe dort vorrätig sind, wo sie dringend benötigt werden, wie beispielsweise in der Medizin, Pharmaindustrie für die Impfstoff- und Medikamentenentwicklung und -produktion, in der chemischen Industrie etc. So können alle dazu beitragen, dass der richtige Handschuh für jede Anwendung zur Verfügung steht. Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Anleitung, wie das Anziehen der TPE Handschuhe erfolgen sollte, um das Material beim Anziehen zu schonen.



1. Entnehmen Sie den Handschuh aus der Box und entfalten Sie ihn.



2. Halten Sie den Handschuhenschaft mit der einen Hand fest und führen Sie die andere Hand vorsichtig in den Handschuh ein.



3. Positionieren Sie die Finger beim Einführen in den Handschuh in die Richtung der dafür vorgesehenen Finger.



4. Halten Sie den Handschuhenschaft mit einer Hand fest und führen Sie die Finger vollständig ohne großen Druck/Zug in den Handschuh ein.



5. Sobald die Finger Ihre Position erreicht haben, leichtes Nachziehen am Schaft, um den richtigen endgültigen Sitz des Handschuhs zu erreichen.



6. Streichen Sie den Handschuh noch einmal mit der flächigen Hand am Handschuh glatt. Der Handschuh erreicht so einen sehr guten Sitz, ohne dass das Material überdehnt wird.

Video „Anziehen eines TPE Handschuhs“

[Video ansehen](#)