



DESIFOR-ONE

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und -reinigung



Einsatzbereich

Zur Desinfektion wasserfester Oberflächen und Böden in Krankenhäusern, in medizinischen Einrichtungen, in Schulen, Kindergärten und Heimen sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentlichen Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung

Fläche mit DESIFOR-ONE-Lösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Karton mit 12 Dosierfl. à 1 Liter Art.-Nr. 20558
Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 20499
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 20498

Wirkstoffe

100 g enthalten 9,0 g 2-Phenoxyethanol, 10,0 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride und 9,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS07, GHS09

BAuA Reg.-Nr. N-63792, N-63793

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid: VAH-Liste, mit Mechanik, hohe Belastung	1,0 % 15 Min. 0,5 % 30 Min.	VAH/DGHM
EN 13727, EN 13624, EN 16615	0,5 % 30 Min.	20 °C, hohe und niedrige Belastung, getränkte Tücher (Standardtuch) können bis zu 28 Tage verwendet werden
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen: bakterizid und levurozid [EN 1276, EN 1650, EN 13697]	0,5 % 5 Min.	20 °C, hohe Belastung
Tuberkulozid (M. terrae) [EN 14348]	1,0 % 60 Min. 0,5 % 120 Min.	hohe und niedrige Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	1,0 % 5 Min. 0,5 % 15 Min.	DW/RK-Leitlinie
begrenzt viruzid [EN 14476]	0,25 % 5 Min. 1,0 % 5 Min.	niedrige Belastung hohe Belastung
begrenzt viruzid PLUS [EN 14476]	1,0 % 60 Min.	hohe Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro- u. Adenoviren)
- Konzentrat
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft und Farbstoffe
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 24 Monate
- IHO-gelistet
- VAH-gelistet
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFORONE WIPES [EN 16615, 4-Felder-Test]

Hinweise

Nicht für Polycarbonat. Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen. DESIFOR-ONE als aminhaltiges Desinfektionsmittel nicht im direkten Wechsel mit aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln anwenden. Vor Umstellung eine gründliche Zwischenreinigung durchführen.

pH conc **0 2 4 6 8 10 14**

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0419

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE