

ORANGE SOLVENT

✓ alkali- und seifenfrei

Spezialreiniger für zahnmedizinisches Instrumentarium

- aus natürlichem Orangenöl
- mit besonderer Reinigungskraft
- entfernt mühelos dentalmedizinische Werkstoffe



CE

PRÄPARATETYP

ORANGE SOLVENT ist eine gebrauchsfertige Reinigungslösung zur gründlichen Entfernung von Alginat- und Zementresten sowie Zink-Eugenolflecken auf dentalmedizinischen Instrumenten und Inventar. Auch zur Entfernung von Kleberesten, Permanentmarkern sowie Streifen auf Fußböden. Auch besonders hartnäckige Flecken, wie z.B. Öl- oder Baumharzflecken in Kleidung und Teppichen, lassen sich mit **ORANGE SOLVENT** entfernen. Sparsam in der Anwendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Entfernung von Alginat- und Zementresten sowie Zink-Eugenolflecken
- Zur Reinigung von Zinkleim- und Gipsverbänden.
- Für die weitgehende Entfernung von Jodflecken und anderen Farbsignalflecken.
- Lästige Aufkleber und alte Etiketten lassen sich nach kurzer Einwirkzeit leicht ablösen und die Klebereste entfernen.
- Löst ölige Flecken aus Kleidung, Teppichen und Polstern.
- Zum Entfernen von lästigen Streifen und Striemen auf PVC- und Linoleum-Böden wie sie z.B. von Bettenrollen verursacht werden.

ANWENDUNG

Einige Spritzer **ORANGE SOLVENT** auf ein Wischtuch oder Wattebausch geben und die zu behandelnden Partien einreiben.

Achtung: Nicht bei allen Kunststoffen, insbesondere bei amorphen Thermoplasten wie Acrylglas oder Polycarbonaten, ist die Materialverträglichkeit garantiert. Unbedingt vor Erstanwendung an nicht einsehbaren Stellen die Verträglichkeit überprüfen.

ZUSAMMENSETZUNG

Natürliche Orangerterpene aus gepressten Orangenschalen, Decyloleat.

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	PZN	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
250 ml Flasche	0792320	9 x 250 ml	00-805-0025
500 ml Flasche	0792337	6 x 500 ml	00-805-005

PRODUKTSTATUS

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Reizt die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.



DR. SCHUMACHER GMBH
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld
Telefon +49 5664 9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM